

Eigenschaften und Anwendungen:

VAROcool ist ein kühlender Halbstarrverband für besonders akute Sportverletzungen z. B. Gelenke, Bänder, Sehnen und Muskeln. Der im Kühlschrank vorgekühlte Verband kann direkt auf die Haut oder nicht infizierte Wunden gewickelt werden. Die Hydrogel-Calciumalginat-Rezeptur fördert die Wundheilung, insbesondere zur Behandlung posttraumatischer Ödeme sorgt der notwendige Kompressionsdruck und die hautfreundliche Kühlung für eine zusätzliche Schonung des verletzten Gewebes. Eine kohäsive Binde vermeidet Verschmutzungen durch den feuchten Verband.

Dieser Verband ist bei peripheren, arteriellen Verschlusskrankheiten, dekompensierter Herzinsuffizienz, Venenentzündungen (septischer Phlebitis) und tiefen Beinvenenthrombosen (Phlegmasia coerulea dolens) **nicht anzuwenden**.

VAROcool

feuchter Halbstarrverband

Beschreibung:

VAROcool ist ein feuchter, kühlender Halbstarrverband der als Stütz- und Kompressionsverband insbesondere bei Sportverletzungen zum Einsatz kommt. Mit einer Dehnbarkeit von über 50% und einer hohen Lagenhaftung, verbindet die Calciumalginat-Rezeptur hautpflegende Eigenschaften mit einer schnellen Wundheilung bei nicht infizierten Wunden. Zur Vermeidung von Verschmutzungen wird zusätzlich eine kohäsive Binde empfohlen.



Materialzusammensetzung:

Baumwolle	82%
Polyamid	9%
Lycra	9%

Artikel-Nr.	Größe	PZN	PE	AEP €
930508	5 m x 8 cm	1160177	1 Stück	9,10
	kohäsive Binde, 4 m x 6 cm		1 Stück	